

## GD ENZIMATICO10



### Detergente a base enzimatica concentrato

*Dispositivo Medico CE*

#### CARATTERISTICHE

GD ENZIMATICO10 è un detergente altamente concentrato da utilizzare per la detersione degli strumenti in ambito medico-chirurgico ed odontoiatrico. La presenza di Enzimi facilita la rimozione del residuo organico anche da strumenti cavi o in prossimità di piegature e viti.

#### COMPOSIZIONE

*100 g di prodotto contengono:*

Tensioattivi non ionici 15-30%;

Tensioattivi anionici 5-15%;

Enzimi;

Profumo (Limonene, Citral),

Conservante (Benzisothiazolinone)

#### DATI TECNICI

*Stato fisico:* liquido

*Colore:* incolore

*Odore:* caratteristico

*pH:* 5-7

*Biodegradabilità:* Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al regolamento CE n.648/04

#### MODALITÀ D'USO

Diluire in acqua in ragione del 2-10%. Si consiglia di versare il contenuto di un misurino di GD ENZIMATICO10 in un litro d'acqua del rubinetto tiepida (circa 40°) e mescolare accuratamente. Prima di detergere gli strumenti nella soluzione preparata, devono essere decontaminati con un prodotto specifico, quindi risciacquarli usando acqua fredda ed immergerli nella soluzione di GD ENZIMATICO10 per dieci minuti. In presenza di residui secchi o di sporco ostinato, prolungare l'immersione a 1 ora ed eventualmente usare uno spazzolino. Risciacquare gli strumenti con acqua prima dell'utilizzo. Particolarmente consigliato per la detersione con vasche ad ultrasuoni. Agitare prima dell'uso.

#### SETTORI E CAMPI D'APPLICAZIONE

Per il settore medico ed odontoiatrico, veterinario, estetico e tatuatori, per la detersione di strumenti e materiali in vetro, plastica, metallo, endoscopi, etc.

#### AVVERTENZE

*Indicazioni di pericolo:* H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. *Consigli di prudenza:* P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P305-P351-P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. *Contiene:* Alcol grasso alcossilato polimero. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura, se correttamente conservato, il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta.

#### SCADENZA

3 Anni.

**CODICE: 5212**

